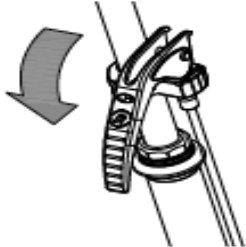
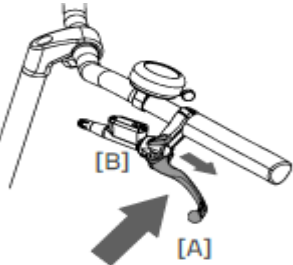
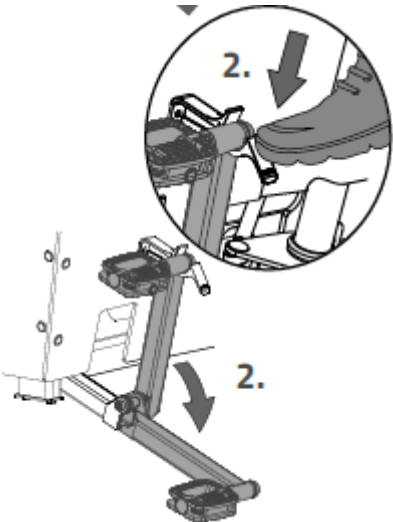
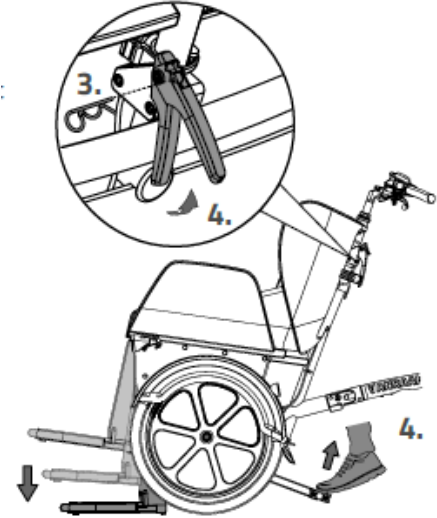
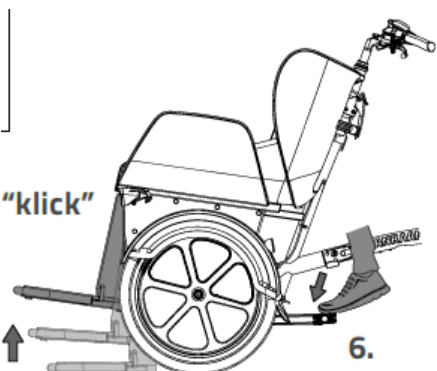



Kurzbedienungsanleitung VanRaam Rikscha „Chat“ oder Rollstuhlrad „Velo Plus“

Feststellbremse:	
	Hellgrauer Hebel nach unten kippen. Hinterrad wird abgebremst. Beim Anhalten betätigen.
Hydraulische Bremse:	
	Betätigung immer wenn Fahrgäste (mit oder ohne Rollstuhl) auf - oder absteigen. Linker Bremshebel fest anziehen und kleinen Hebel betätigen. Nur auf ebener Fläche abstellen. Nicht für längeres Parken gedacht - dann Feststellbremse verwenden
Fußplatte absenken:	
	1. Feststellbremse betätigen 2. Entriegelungslasche mit Fuß betätigen, Fußpedal kippt nach unten


	3. Sicherungsstift entfernen 4. Mit dem Fuß auf das Fußpedal treten und den Hebel nach oben ziehen. Fußplatte senkt sich, dabei durch Gegendruck mit dem Fuß Sinkgeschwindigkeit steuern.
---	--

Fußplatte anheben:

	6. Mit dem Fuß langsam auf das Pedal drücken, bis es mit einem hörbaren „Klick“ einrastet. Die Fahrgäste vor der Betätigung der Fußplatte informieren. Keine schweren Lasten auf die Fußplatte, auch nicht darauf stehen.
--	--

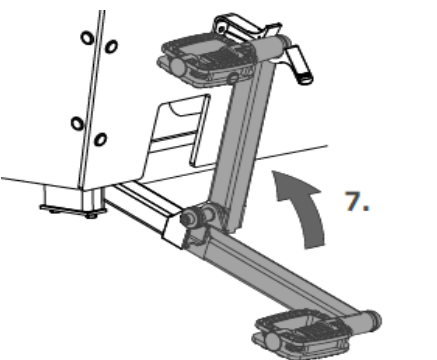	7. Fußpedal wieder in die Halterung zurücksetzen 8. Sicherungsstift wieder einstecken
---	--

Bedien- und Anzeigedisplay

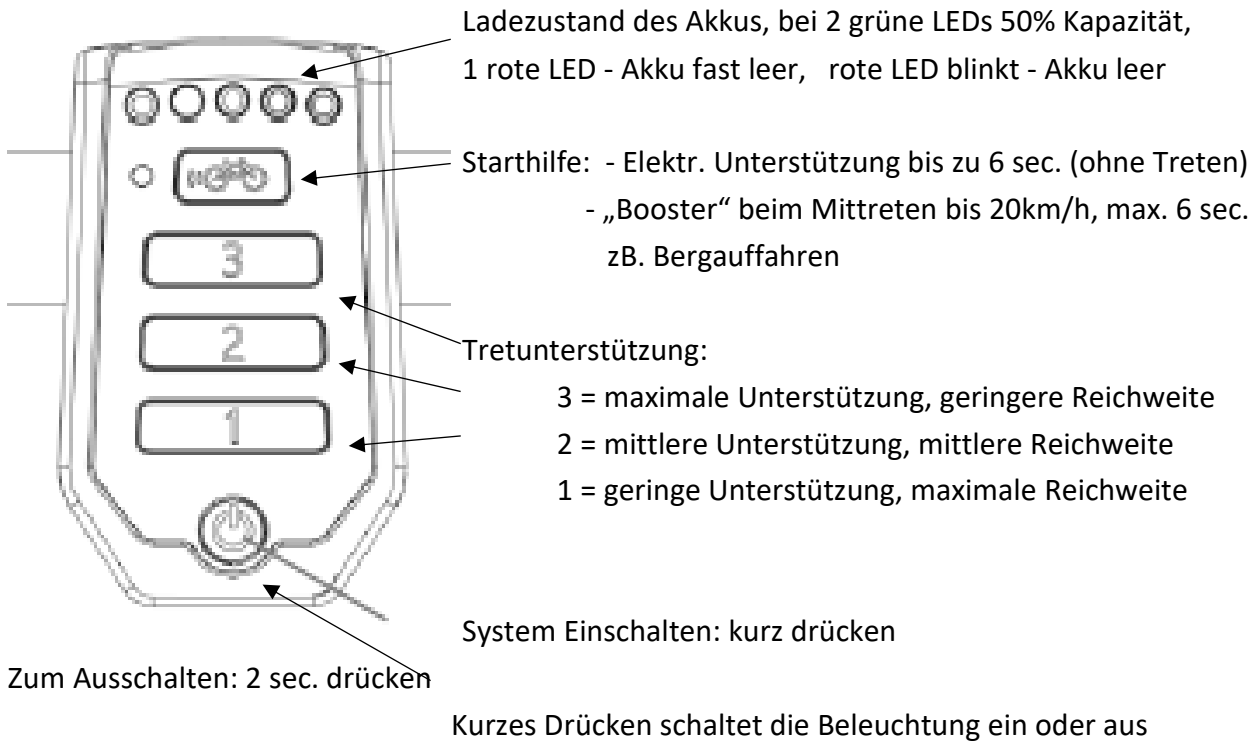


Rückfahrfunktion:

Die Rückfahrfunktion wird durch das Rückwärtstreten aus dem Stillstand aktiviert.

Nach wenigen Sekunden schaltet sich der Motor ein und die Rikscha fährt mit ca. 2 km/h rückwärts, so lange rückwärts getreten wird.

Stromversorgung:

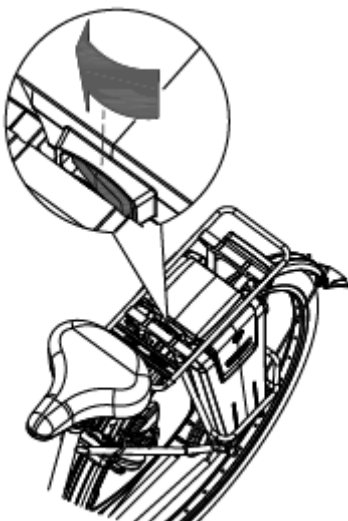

Beim Gepäckträger befinden sich 1 Haupt- und ein Reserve Akku, sowie ein Kippschalter.

Kippschalter nach links - linker Akku (1) ist aktiv (Hauptakku)

Kippschalter nach rechts - rechter Akku (2) ist aktiv (Reserveakku)

Achtung: In Mittelstellung sind beide Akkus ausgeschaltet

Beim Laden ist die Stellung des Kippschalters unerheblich.

Akkus nach jeder Fahrt aufladen.

Ladekabel an Ladebuchse anstecken:

- Rote LED leuchtet - Ladevorgang läuft
- Grüne LED leuchtet - Akku ist voll

Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden

Gangschaltung:

Die Gangschaltung wird durch Drehen am rechten Handgriff bedient.