


Lenkerdrossel



Die Lenkerdrossel beeinflusst die Stabilität beim Lenken. Durch Anziehen der Schraube erschwert sich das Lenken und erhöht sich die Stabilität. Sie bestimmen in der Praxis selbst, was für Sie am angenehmsten ist.

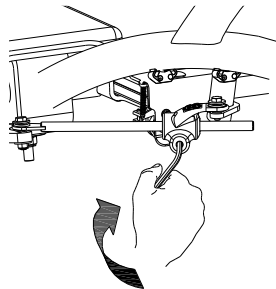

Rollstuhltransport

Wenn Sie auf dem VeloPlus3 einen Rollstuhl transportieren möchten, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.


1. Ziehen Sie die Feststellbremse des Rollstuhlrads an, indem Sie die linke Bremse betätigen [A] und die Bremse mit dem kleinen Hebel [B] fixieren.
2. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.
3. Ziehen Sie den Hebel nach oben, sodass die Auffahrplatte entriegelt wird und nach unten fällt.
4. Schieben Sie den Rollstuhl rückwärts die Auffahrrampe hoch. Bewegen Sie den Rollstuhl nach hinten, bis die Auffahrplatte hochklappt und sich automatisch verriegelt, wobei ein Klickgeräusch zu hören ist.
5. Fixieren Sie den Rollstuhl mithilfe der drei Riemen. Drücken Sie auf den Knopf, sodass sich der Riemen löst und befestigen Sie den Haken am Rollstuhl.

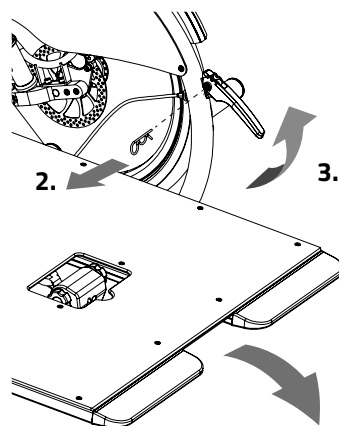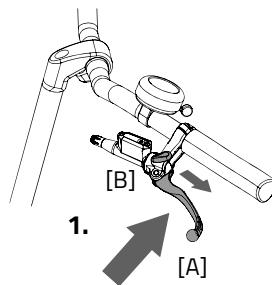

Wichtig! Platzieren Sie den Rollstuhl nur in Fahrtrichtung auf der Rampe. (siehe Abbildung)




Wichtig! Stellen Sie sicher, dass sich die Auffahrplatte verriegelt! Andernfalls kann es zu sehr gefährlichen Situationen kommen. Falls sich die Platte nicht verriegelt, drücken Sie mit dem Fuß [A] darauf, bis die Platte einrastet.

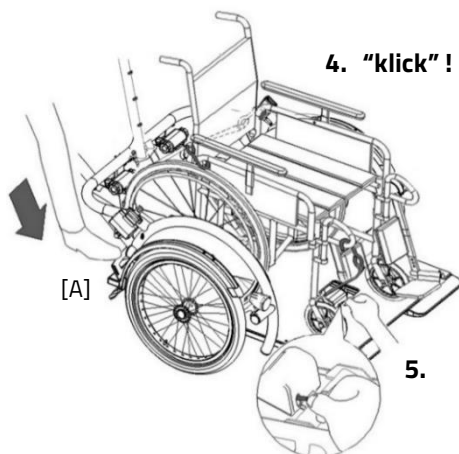

Wichtig! Achten Sie darauf, dass die Platte durch das Gewicht des Rollstuhls von alleine hochklappt, sobald der Rollstuhl auf der Auffahrrampe steht. In dem Moment befindet sich der Schwerpunkt des Rollstuhls oberhalb der Vorderräder des Fahrrads. Dies sorgt für die richtige Gewichtsverteilung des Fahrrads.

6. Draai vervolgens aan de sterknop om de riemen strak te spannen.
7. Doe tenslotte de veiligheidsriem om de passagier.
8. Steek de veiligheidspen weer in de koppeling.

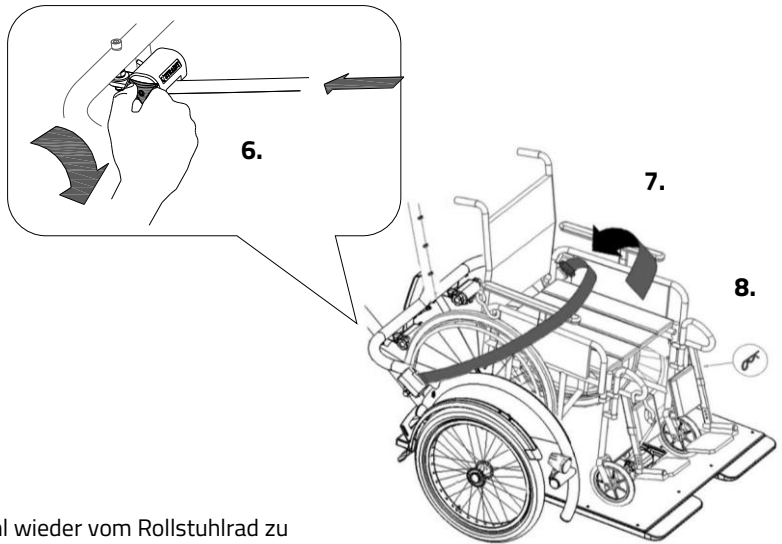

Um den Rollstuhl wieder vom Rollstuhlrاد zu nehmen, folgen Sie diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.



Wichtig: Halten Sie den Rollstuhl beim Lösen der Haken fest, damit er nicht von der Auffahrplatte rollen kann.